

OP - Technik

1 Transfer des flüssigen Härtemittels

Öffnen der
Sterilverpackung



Spritzenspitze nach oben halten



Wahlventil im Uhrzeigersinn auf „transfer“ - Position drehen



Den Stößel mit dem Kolben verbinden und herunterdrücken,...



... bis sämtliche Flüssigkeit in die Kammer mit dem Pulver geführt ist

2 Mischen des Pulvers mit dem flüssigen Härtemittel



Wahlventil muss auf „transfer“ - Position stehen.



Flüssigkeit und Pulver mischen. Sicherstellen, dass...



... das Produkt an beiden Enden gründlich gemischt wird.

3 Direkte Injektion



Mischer bis zum Anschlag herausziehen, Stößel entfernen und an den Mixer klemmen.



Wahlventil im Uhrzeigersinn auf „inject“ - Position stellen.



Falls erforderlich, Kanüle anschließen. Stößel und Mischer zum Injizieren herunterdrücken.

4 Injektion mit Hilfe der Injektionspistole



Wahlventil muss auf „transfer“ - Position stehen.



Mischer bis zum Anschlag herausziehen und am unteren Ende abbrechen.



Spritze mit Injektionspistole verbinden.



Wahlventil im Uhrzeigersinn auf „inject“- Position stellen.




Falls erforderlich, Kanüle anschließen. Handgriff betätigen, um zu injizieren.



Produkt	Mischzeit bei 20°-22°C	Verarbeitungszeit bei 20°-22°C	Abbindezeit bei 37°C
Graftys® HBS <small>hydroxyapatite bone substitute</small>	2 min.	15 min.	15 min.
Graftys® Quickset <small>injectable macro porous bone substitute</small>	2 min.	2 min.	8 min.

Graftys - Eiffel Park- Bât. D - 415, rue Claude Nicolas Ledoux
Pôle d'activité d'Aix en Provence - 13 854 Aix en Provence Cedex 3 - France
Phone : +00 33 (0)4 42 60 30 00 - Fax : +00 33 (0)4 42 60 30 11
www.graftys.com

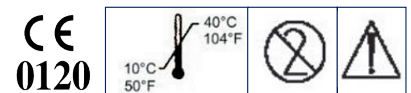

Graftys wird vertrieben durch:



tantum AG
Memellandstraße 2
D-24537 Neumünster
Fon +49 43 21 200 59-0
Fax +49 43 21 200 59-19
info@tantum-ag.de

www.tantum-ag.de